


کلیدهای دستگاه ونتیلاتور ماری HAMILTON مدل RAPHAEL

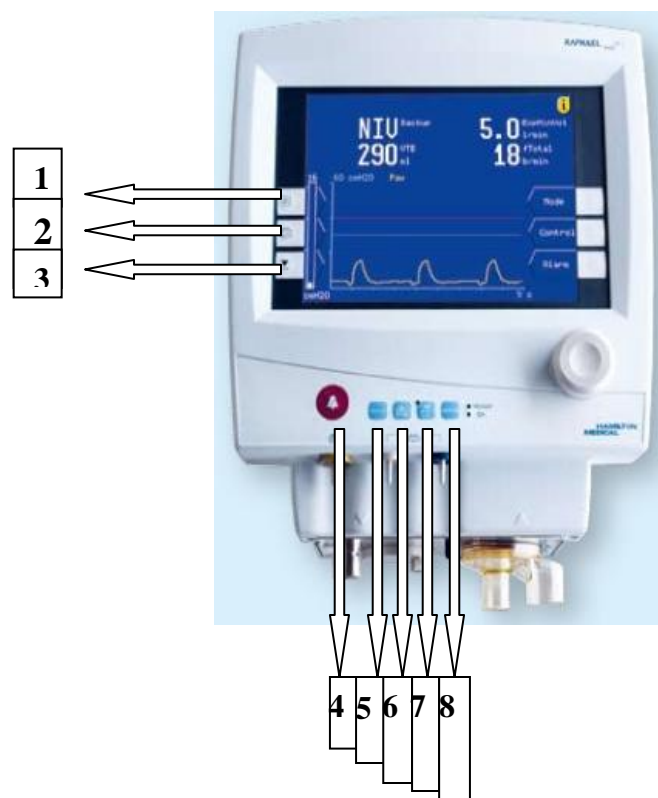

1 کلید اطلاعات عددی مربوط به بیمار :

۱۹ پارامتر حیاتی مربوط به بیمار را نشان می دهد.

2 کلید انتخاب منحنی ها :

جهت انتخاب و نمایش یکی از منحنی های موجود استفاده می شود.

3 کلید انجام تستها :

جهت انجام تستهای Tightness Test (عدم نشتی تیوبینگ) ، تست فلوسنسور ، کالیبراسیون سنسور اکسیژن ، نمایش میزان شارژ بودن باتری های داخلی و تنظیم میزان شفافیت صفحه نمایش می باشد.



4 کلید خاموش کردن آلام :

صدای آلام شنیداری را بمدت ۲ دقیقه قطع می کند.

100% O₂

5 کلید اکسیژن ۱۰۰٪ :

به مدت ۴ دقیقه اکسیژن خالص ۱۰۰٪ را به مریض ارائه می دهد.



6 کلید دو منظوره (حبس هوای دم / تنفس مکانیکی بصورت دستی) :

- با فشردن و نگاه داشتن این کلید می توانید در فاز دم ، ریه را در حالت پر شده نگه دارید
- با هر بار فشردن و رها کردن ، یک تنفس مکانیکی در همان لحظه به مریض ارائه می شود



7 کلید نبولایزر :

این کلید عمل نبوله کردن در فاز دمی را به مدت ۳۰ دقیقه فعال می کند.



8 کلید آماده باش :

دستگاه را در حالت آماده باش قرار می دهد.

"نحوه نصب تیوپینگ تنفسی بیمار"

